

4. 1) (3) 介護用リフト・つり具の日常点検

*使用前・後点検はもちろんのこと、月例点検、年次点検を必ず行いましょう！

| 介護用リフト | |
|--------|--|
| 1 | いつもと違う振動がないか |
| 2 | 異音がないか |
| 3 | リフトベルトのねじれや摩耗、ハンガー接続部分のゆるみや破損がないか |
| 4 | キャスター（車輪）がスムーズに動くか |
| 5 | ブレーキが利くか |
| 6 | バッテリー充電が十分か |
| 7 | 使用後に充電したか |
| 8 | バッテリーの交換時期が来ていないか（バッテリーが弱くなってきたら早めに交換する） |
| つり具 | |
| 1 | 直射日光のない場所に保管してあるか |
| 2 | 清潔に保管・管理しているか（感染予防対策を含む） |
| 3 | 糸のほつれや布の裂け目がないか |
| 4 | 適切に洗濯をしてあるか（漂白剤を使用しての洗濯や衣類乾燥機での乾燥をしない） |